

事務連絡  
平成23年1月27日

各都道府県消防防災主管(部)局  
救急事務担当者各位

消防庁救急企画室

フィリップスエレクトロニクスジャパン株式会社製半自動式除細動器に関する  
情報提供について

平素から救急行政にご協力いただき、ありがとうございます。

標記について、フィリップスエレクトロニクスジャパン株式会社(以下「フィリップス社」という。)より、半自動式除細動器のハンドル破損につきまして、別添のとおり情報提供がありました。

つきましては、その内容を確認の上、貴都道府県内市町村(消防の事務を処理する組合・連合を含む。)に対し周知をお願い致します。

なお、該当消防本部へはフィリップス社から別途連絡がありますので併せてお知らせいたします。

連絡先 総務省消防庁救急企画室 担当: 谷本・梅澤・橋口 電話 03-5253-7529 FAX 03-5253-7539
---

総務省消防庁 救急企画室 御中

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

## ハートスタート MRxE のハンドル に関する報告書

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

今回発生したハートスタートMRxEのハンドルの破損の事例について、調査・検討を行いました。弊社と致しましては、ハートスタートMRxE/MRxの持ち運び時の注意および日常点検におけるハンドルの取り付け状態の確認について、別紙により各消防関連施設に連絡を行います。

又、予防保全の観点から、新タイプのハンドルユニットへの交換を準備ができ次第、各消防関連施設に対して行います。

敬具

お客様各位

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

## ハートスタート MRxE/MRx の持ち運びに関する注意事項

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

今般、救急隊員が救急車よりハートスタートMRxEを持ち運び、階段を移動中にハートスタートMRxEのハンドルが破損し、本体が落下した事例が報告されました。

そのためハートスタートMRxE/MRxの持ち運びにおいては、下記の点に注意してご使用して頂きますようご連絡申し上げます。

また、今後予防保全の観点から、耐久性を向上させたハンドルユニットへの交換を消防関連施設に対して予定しています。交換準備ができ次第、ご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. ハートスタート MRxE/MRx を持ち運ぶときは、右図のように付属のショルダーベルトを併用してください。
2. 日常点検の外観チェック時に、ハンドルの取り付け状態の確認を行ってください。
  - ・ハンドルの外観に傷、破損がないこと
  - ・ハンドルにぐらつきがないこと

万が一、点検により問題が確認された場合は、使用を中止して販売店または レールダルメディカルジャパン株式会社 カスタマーサービス (電話 0120-309-060) までご連絡ください。



以上