

事 務 連 絡
平成 23 年 2 月 24 日

各都道府県消防防災主管部（局）長 殿

消防庁救急企画室長

日本光電の半自動除細動器（TEC-2500 シリーズ）の自主改修に関する情報提供

別添のとおり日本光電工業株式会社（以下「日本光電」という。）より半自動除細動器（TEC-2500 シリーズ）の自主改修（クラスⅠ）について情報提供がありました。

自主改修に関する具体的な対応については近日中に日本光電が該当消防本部に対して、直接説明を行う予定です。

つきましては、別添の【改修完了までの当面の装置のご使用について】の1）から4）を踏まえた対応が図られるよう、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）に対し周知するようお願い致します。

（重要）

なお、半自動除細動器の取扱いについては、「（緊急）日本光電の半自動除細動器の不具合に関する対応」（平成 23 年 2 月 23 日付消防救第 59 号各都道府県消防防災主管部（局）長あて消防庁救急企画長）で通知しているとおります。

消防庁救急企画室
谷本・梅澤・橋口
電話 03-5253-7529

総務省消防庁救急企画室長 殿

2011年2月24日
日本光電工業株式会社
品質管理統括部
仙波 正人

件名：半自動除細動器 TEC-2503/2513 の自主改修について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、弊社が販売しております半自動除細動器（TEC-2503/2513）の自主改修の届出を行いました。

製品の品質には万全を期して参りましたが、この度は皆様にご迷惑をおかけする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

該当消防本部様へは、弊社担当者が別紙のお客様向け案内文章をお届けして説明し、作業日程を調整の上、順次改修作業をさせていただきます。

今後も弊社製品を安心してご使用いただけるよう最大限の努力を行って参りますので、引き続きご指導いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

以 上

平成23年2月

お客様各位

日本光電工業株式会社
品質管理統括部
仙波 正人

半自動除細動器 TEC-2503/2513 の自主改修について

拝啓

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社が販売しております半自動除細動器（TEC-2503/2513）を下記のとおり自主改修させていただきますことになりました。
誠に申し訳ありませんが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

【改修理由】

当該製品を使用した際、電源投入直後に電源が切れる事象が発生したとの報告を受けました。
弊社で調査した結果、装置内部が0℃付近又はそれ以下になった状態で電源を投入すると内部のトランジスタがショートしてヒューズが熔断する可能性があることが判明しました。
このため、耐えられる温度範囲を改善する目的で部品交換による自主改修を行います。

【改修対象】

対象製品名：TEC-2503
数量：24台
製造番号：00001～00024
出荷時期：平成20年6月24日～平成23年2月18日

対象製品名：TEC-2513
数量：1,168台
製造番号：00001～00034、00036～00230、00232～00333、00343～00397、00399～00408、00410、
00412～00850、00852～00941、00944～01010、01012～01070、01072～01187
出荷時期：平成20年6月9日～平成23年2月18日

【改修方法】

対策済みのTEC-2500を代替機として準備の上、改修対象機器をお預かりし、内部トランジスタのショートを引き起こさない部品に交換し検査の上で返却いたします。

【改修時期】

改修の時期は準備が整い次第、個別にご案内申し上げます。

【改修完了までの当面の装置のご使用について】

改修作業が完了するまでの間、改修対象機器の取扱について以下の様に、ご対応いただきたくお願い申し上げます。

- 1) お手持ちの改修対象機器以外の半自動除細動器(例えば、弊社製品 TEC-2300 シリーズ等)を所有されている場合は代替品として、ご使用ください。
- 2) 入れ替えが出来ない場合は予備機(AED-9231 又は、AED-1200)を用意させていただきます。改修対象機器をお預かりするまで予備として、当該装置の近傍に設置ください。
- 3) 上記2項を共に実施できない場合は、当該装置の使用の停止をお願いします。
- 4) 改修スケジュールは個別に御連絡させていただきます。

製品の品質には万全を期して参りましたが、この度は皆様にご迷惑をおかけする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

本件を機になお一層の品質確保に努力を重ねる所存でございますので、今後ともよろしくご指導いただきますようお願い申し上げます。

敬具

担当営業

製造販売元

日本光電工業株式会社
品質管理統括部長
仙波 正人